

— Soft laser expertise

premi^o 32

Laser A-G program



Fysiotherapie
Sportgeneeskunde
Lokale toepassingen
Lasertherapie



Sedatelec

The logo for Sedatelec, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The text is partially enclosed by a grey circular arc that starts above the 'S' and ends below the 'c'.

premio 32

Laser A-G program

Stimuleert de natuurlijke eigenschappen van de cellen



4 stimulerings-programma's
(Antal, Regen, Relax, A-G)



Nogier frequenties
Individueel



Autonomie meer dan 10 uur
Oplaadbare batterij

Combinaties Nogier frequenties: fysiologische effecten

3 basisprogramma's

Pijnstillend

Dit **pijnstillend** programma (frequentie E en G) vermindert de overdracht van **pijn** naar het centraal zenuwstelsel. De lokale werking op het **inflammatoire** proces verbetert het **gevoel van de patiënt** en de kwaliteit van de lokale reactie

Weefselregeneratie

Dit programma (frequentie A, B en F) versnelt het **weefselherstel**, herstelt de celfuncties, versnelt de **littekenvorming en de regeneratie**, aan het huidoppervlak en diepliggend.

Spierontspannend

Dit programma (frequentie C, D en G) bevordert de ontspanning bij **druk** en **spierspasmen**.

1 universeel programma

Bestrijken Nogier frequenties

Programma A-G:
een afwisselende emissie van alle Nogier frequenties (frequentie A, B, C, D, E, F, en G).

Individuele keuze Nogier frequenties


Elk van de 7 Nogier frequenties kan individueel worden gekozen. Elke frequentie werkt in op een bepaalde fysiologische functie.



De 7 basisfrequenties van Nogier

Het werk van dokter Paul Nogiervormt de grondslag voor de moderne frequentiegeneskunde. Door methodisch, wetenschappelijk onderzoek heeft hij **7 basisfrequenties geïdentificeerd**.

- **A** (2,28 Hz)
- **B** (4,56 Hz)
- **C** (9,12 Hz)
- **D** (18,25 Hz)
- **E** (36,5 Hz)
- **F** (73 Hz)
- **G** (1,14 Hz).

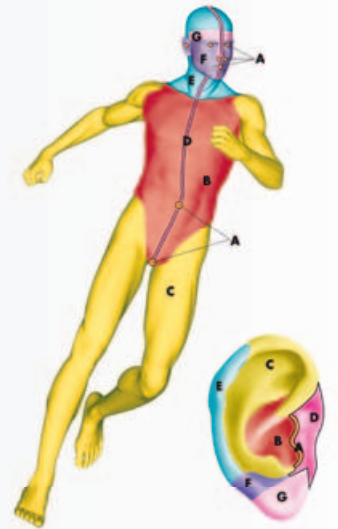

Het menselijk organisme reageert sterker op prikkels op bepaalde frequenties of frequentie-combinaties.

Frequentietherapieprogramma's

Hiermee is selectieve bioprakkeling van het reactievermogen van de patiënt mogelijk. Bij de behandeling van bepaalde aandoeningen wordt door combinatie van verschillende Nogier frequenties een synergie gecreëerd die complementaire biologische functies stimuleert.

Individuele frequenties

Kies een individuele basisfrequentie. De gefrequeceerde informatie mobiliseert de receptoren. Ze geven de boodschap door aan het centraal zenuwstelsel dat de gewenste fysiologische en lokale reacties opstart.



Erkende expertise **ultrapuls laser**

De korte pulsstoten (ultrapuls emissie) zijn ingesteld op de Nogier frequenties. Ze geven een energie van **2 joule per minuut** voor een vermogen van **40 W**.

Deze pulswijze met een piekvermogen van 40 watt geeft de laserstraal het **vermogen dat nodig is om door te dringen tot de diepst liggende cellen** en biedt zo lokaal de informatie die nuttig is voor de efficiënte mobilisatie van de bronnen van het organisme.

De cellen worden kort geprikkeld met voldoende energie om de verwachte biologische reactie op te wekken.

Voor fijnere weefsels (slijmvliesweefsel) of gevoelige delen van het lichaam (gezicht en oorschelp) kan met de vermogensreductor (ERP) het **emissievermogen worden afgezwakt (~15W)**.

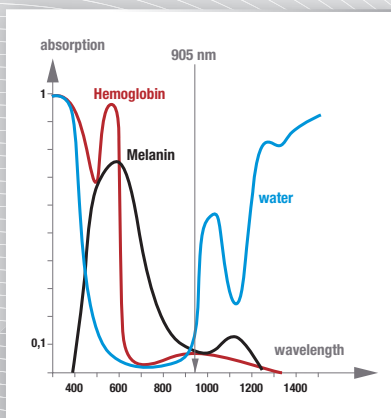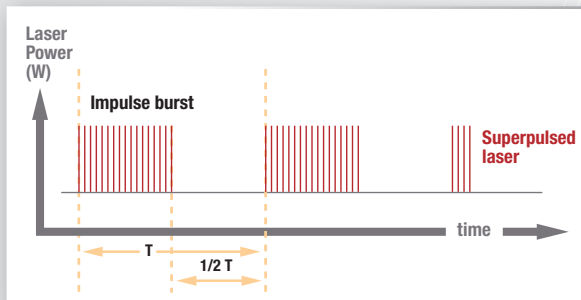

Optimale werkzaamheid

De **infrarood-emissie op een golflengte van 905 nm** passeert de huidbarrière, bereikt de diepliggende cellen en dringt in alle veiligheid door zonder absorptie door het water, de hemoglobine en de melanine van de huid.

Korte behandeling

30 seconden tot 1 minuut

Her **+** van Sedatelec: **het witte richtlicht**


Deze bundel **wit licht is therapeutische gezien neutraal**, het verlicht de laserstralzone en biedt optimaal gebruikskomfort.

De signatuur van Sedatelec: **de Nogier frequenties**



premio 32

Laser A-G program

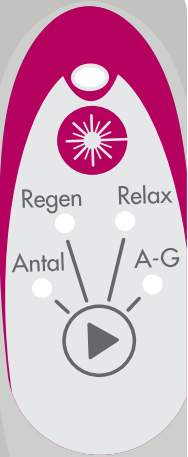

Werkzaam, licht en ergonomisch

Een draadloze laser, ideaal in de praktijk en aan huis



Onzichtbare laseremissie. Richt de laserstraal niet op de ogen. Classificatie 3B volgens IC60825-1
Caution : Federal law restricts this device to sale by or on ther order of a physician.



AcupunctuurDirect.nl

Alles voor uw acupunctuurpraktijk, direct bij u thuisbezorgd

CE 0123

Vervaardigd in Frankrijk

- A ●
- B ●
- C ●
- D ●
- E ●
- F ●
- G ●

